

Aufbewahrung, Anwendungsdauer, Entsorgung

Aufbewahrung

Lagern Sie den i3 WundPen mit verschlossener Schutzkappe und Schraubverschluss bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort.

Anwendungsdauer

Der i3 WundPen hat eine Anwendungsdauer von 50 Anwendungen à 3 Minuten. Die Haltbarkeit des Filters beträgt nach dem Öffnen der Verpackung 50 Tage. In ungeöffnetem Zustand der Verpackung hat der i3 WundPen eine Haltbarkeit von einem Jahr. Beachten Sie hierzu das Verfallsdatum auf dem Produkt. Eine verminderte Wasserqualität kann die Lebensdauer des i3 WundPen negativ beeinflussen.

Entsorgung

Die Entsorgung des i3 WundPen erfolgt über den Hausmüll.

Zusätzliche Informationen

1. Der i3 WundPen darf nicht mit der Wunde in Berührung kommen.
2. Die Membran auf der Wasser-Einlass-Seite (Gewinde) darf nicht berührt werden.
3. Die Funktion ist nur gewährleistet, wenn der i3 WundPen und die Schutzhülle nach Gebrauch desinfiziert werden.
4. Die Wasseraustrittsseite des Filters darf nicht berührt werden, lediglich zum trocken wischen und anschließender Desinfektion.
5. Vermeiden Sie den Kontakt des Filters mit anderen Gegenständen.
6. Deinstallieren Sie den Filter nach der Anwendung.
7. Beschriften Sie den Filter nicht.
8. Schließen Sie den i3 WundPen nicht an Niederdrucksysteme an.
9. Die Wiederaufbereitung des Produktes ist ausgeschlossen.
10. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Filter und Duschschauch dicht ist und dass der Duschschauch keine Risse aufweist, damit unfiltriertes Wasser nicht in Berührung mit der Wunde kommen kann.
11. Verwenden Sie den i3 WundPen nur, wenn die Verpackung vor der ersten Benutzung unbeschädigt ist.
12. Verwenden Sie keinen beschädigten i3 WundPen.

Für Ihre Sicherheit (bitte tragen Sie hier jeweils das Datum ein):

Datum der ersten Benutzung: _____

Datum des Verfalls (Datum der ersten Benutzung + 50 Tage) _____



i3 WundPen Sterilfilter zur Wundspülung - Bedienungsanleitung -



i3 Membrane GmbH - Bautzner Landstr. 45 - DE-01454 Radeberg
info@i3membrane.de - www.i3membrane.de
Tel.: 040-2576748-0 - Fax: 040-2576748-48

Technische Daten und Lieferumfang

Produktbeschreibung

Der i3 WundPen ist ein endständiger Wasserfilter zum Spülen von Wunden mit sterilfiltriertem Wasser zur Infektionsprävention. Der i3 WundPen wird zur Reinigung von Wunden eingesetzt, insbesondere von chronischen und postoperativen Wunden.

Technische Daten

Keimrückhalt:	>7 Logstufen <i>Brevundimonas diminuta</i> pro cm ² Filterfläche
Porengröße:	0,2 µm
Anwendungsdauer:	50 Tage oder 50 Anwendungen à 3 Minuten
Durchflussleistung:	2 l/min bei 5 bar
Maximaler Betriebsdruck:	5 bar
Maximale Betriebstemperatur:	40 °C
Adaption:	G 1/2" Außengewinde


Lieferumfang


1 x i3 WundPen
1 x Schutzkappe
1x Verschlusskappe
1x Gebrauchsanweisung


Zertifikat/Konformitätserklärung

Auszug aus der Konformitätserklärung der i3 Membrane GmbH, Bautzner Landstrasse 45, 01454 Radeberg:

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der i3 WundPen in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2017/745 konstruiert und gefertigt ist und die Verfahren gemäß Anhang I, II und III befolgt wurden.


 Medizinprodukt

 Gebrauchsanleitung beachten

 2030019

 Verfallsdatum

 Nicht wieder verwenden

 Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist

Installation und Deinstallation

Vorbereitende Maßnahmen

Führen Sie vor der Installation des i3 WundPen eine Händedesinfektion durch. Nehmen Sie den i3 WundPen erst unmittelbar vor der ersten Anwendung aus der Verpackung.

Achtung: Vermeiden Sie möglichst einen Kontakt mit unfiltriertem Wasser (z.B. aus dem Duschschauch).

Installation



1. Drehen Sie den Schraubverschluss des i3 WundPen ab und bewahren Sie ihn zur späteren Verwendung auf.
2. Schrauben Sie den vorhandenen Duschkopf vom Duschschauch ab. Halten Sie den Duschschauch senkrecht, um einen unerwünschten Wasseraustritt sowie einen Verlust des Dichtungsringes aus dem Duschschauch zu vermeiden.



3. Den i3 WundPen handfest an das Anschlussstück des Duschschauches anschrauben und die Schutzkappe abziehen. Bewahren Sie die Schutzkappe ebenfalls zur Verwendung auf.



4. Überprüfen Sie die Verbindung auf Ihre Dichtigkeit.
5. Führen Sie eine Oberflächendesinfektion des i3 WundPen durch.

Führen Sie die Spülung der Wunde durch

Deinstallation



1. Schrauben Sie den i3 WundPen vom Duschschauch ab.
2. Verschließen Sie die Einlass-Seite mit dem Schraubverschluss.



3. Trocknen Sie den i3 WundPen mit einem Papiertuch ab.
4. Führen Sie eine Händedesinfektion durch.



5. Der i3 WundPen darf, bei Verwendung der zugelassenen Desinfektionsmittel, wischdesinfiziert werden (siehe www.i3membrane.de/wundpen-desinfektion). Desinfizieren Sie die Auslassseite sowie die Oberfläche des i3 WundPens und die zugehörige Schutzkappe.



6. Verschließen Sie den i3 WundPen mit der Schutzkappe.